

# Spiegelberg:

Technology for brains



Stieglitz | Spülsauger



Stieglitz | Spülsauger

# Inhalt

Endlich: Spülen und Saugen  
mit einem Handgriff

**4**

Dr. med. Lennart Stieglitz  
Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie  
UniversitätsSpital Zürich

Einfacher Wechsel von Saug-  
zu Spülfunktion

**6**

Kontrollierte Saugstärke

Sichere Anschlüsse für Saug-  
und Spülschlauch

Eine Spitze zum Saugen und  
Spülen

Kombinierbare Spitzen

**7**

Beschreibung

**7**

Stieglitz-Spülsauger

# Endlich: Spülen und Saugen mit einem Handgriff

## Spülen und Saugen begleiten eine mikrochirurgische Operation vom Anfang bis zum Ende.

Das Spülen wird meistens durch einen zusätzlichen Mitarbeiter durchgeführt. Dieses Vorgehen erfordert jedoch weiteres Personal und führt außerdem, was noch schwerwiegender ist, zu einer Beeinträchtigung der Sicht des Operateurs durch das zweite Instrument. Des Weiteren erfordert diese Praxis ständige Anweisungen durch den Operateur mit all den Nachteilen wie zeitliche Beeinträchtigung und Auswirkungen auf die Konzentration und Präzision.

Der Stieglitz-Spülsauger kombiniert in einer einzigartigen Art beide Funktionen in einem kleinen mikrochirurgischen Einweg-Instrument.

Das spezielle ergonomische Design erlaubt eine intuitive, sichere Handhabung.

Durch seine ergonomische Gestaltung ist der Stieglitz-Spülsauger für eine Vielzahl von Griffpositionen geeignet. Er wird mittels zweier flexibler Schläuche an eine Druckinfusionspumpe und einen Vakuum-Sauger angeschlossen.

Mit Hilfe einer schlüsellochförmigen Öffnung kann die Saugkraft optimal dosiert werden. Durch eine aufgesetzte Spitze wird sowohl gesaugt als auch gespült. Mit einer kleinen Fingerschiebung von der Schlüsellochöffnung zu einem leicht zu betätigenden Druckknopf wird von der Saug- in die Spülfunktion gewechselt.



*»Ein frei einsehbares Operationsgebiet ist unerlässlich bei mikrochirurgischen Eingriffen.*

*Dieses Instrument gibt dem Operateur die volle Kontrolle über die beiden dafür wichtigsten Funktionen in die Hand.«*

DR. MED. LENNART H. STIEGLITZ  
Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie  
UniversitätsSpital Zürich



# Einfacher Wechsel von Saug- zu Spülfunktion: Sichere Kontrolle und präzise Dosierung auf den Punkt!



## 1 | Einfacher Wechsel von Saug- zu Spülfunktion

Durch leichten Druck auf den Knopf wird zwischen Saug- und Spülfunktion gewechselt. Die einfache Betätigung erlaubt eine sichere Kontrolle und Präzision bei mikrochirurgischen Eingriffen.

## 3 | Sichere Anschlüsse für Saug- und Spülschlauch

Der im Lieferumfang enthaltene Spülschlauch mit Luer-Lock-Konnektor gewährleistet den Anschluss an eine Spülflüssigkeitsquelle. Der Stutzen dient zum Aufstecken eines Saugschlauches.


## 2 | Kontrollierte Saugstärke

Zum Saugen verschließen Sie die schlüsellochförmige Öffnung ganz oder nur teilweise für eine kontrollierte und feine Dosierung der Saugstärke.

## 4 | Eine Spitze zum Saugen und Spülen

Der Luer-Lock-Konnektor dient zum sicheren Anbringen von Spitzen bis 3 mm Durchmesser mit Luer-Lock.



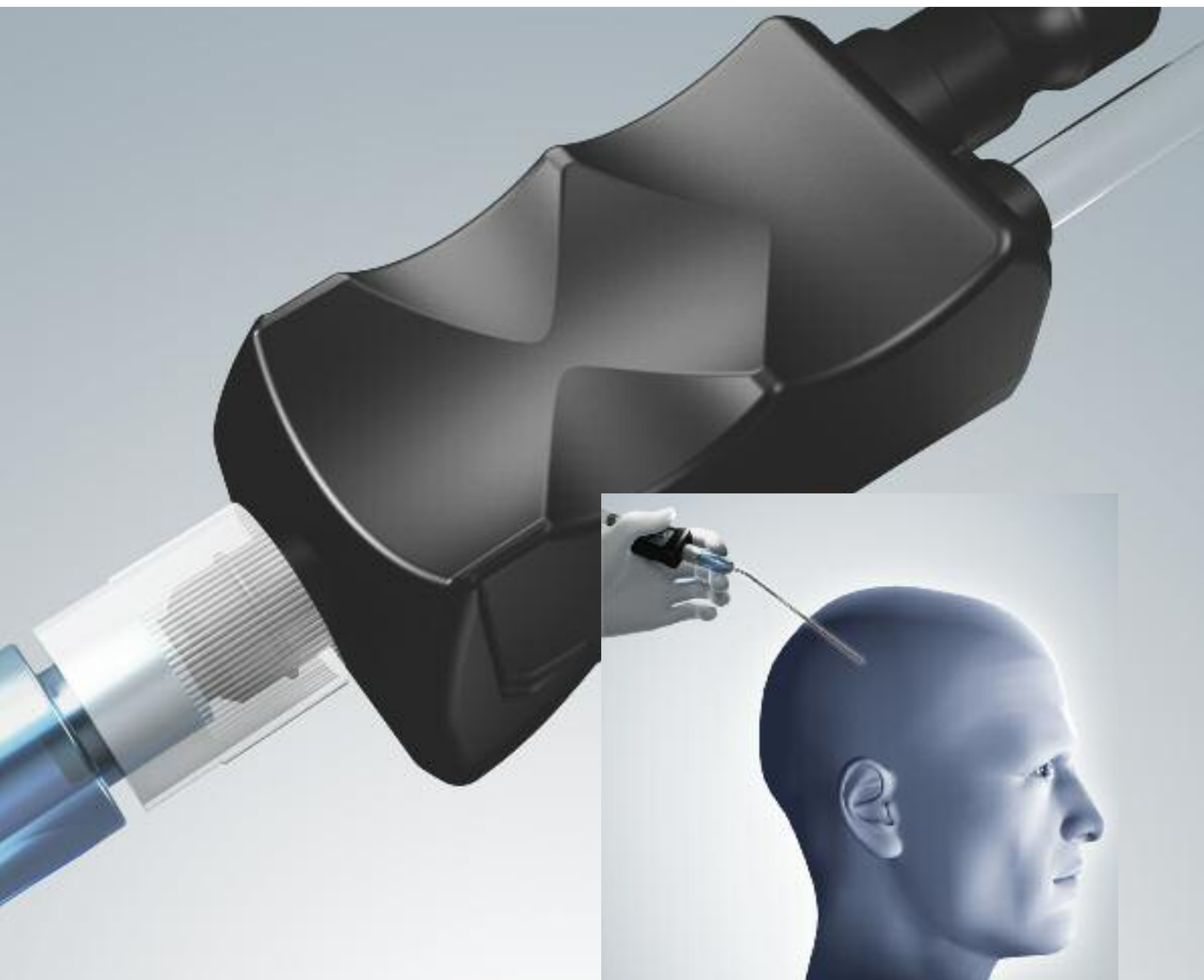

### Technische Daten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Durchmesser des Saugstutzens | 8 mm   |
| Länge des Schlauches         | 120 cm                                       |
| Kombinierbar mit Spitzen     | bis 3 mm Durchmesser mit Luer-Lock-Konnektor |
| Anwendungsdauer              | vorübergehend bis zu 6 Stunden               |
| Latexfrei                    |  |
| Steril verpackt              |  |
| EO sterilisiert              |  |
| Zur einmaligen Verwendung    |  |

### Bestellinformationen

| Bezeichnung   | REF          |
|---|--------------|
| Stieglitz-Spülsauger                                | INS01.001.01 |
| Metallsauger 3,0 x 100 mm 11 Gauge 25 Stück/Packung | INS01.102.01 |
| Metallsauger 3,0 x 130 mm 11 Gauge 25 Stück/Packung | INS01.102.02 |
| Metallsauger 2,0 x 100 mm 14 Gauge 25 Stück/Packung | INS01.102.03 |
| Metallsauger 2,0 x 130 mm 14 Gauge 25 Stück/Packung | INS01.102.04 |
| Überleitsystem Ecospike-Arthros Nr. 2*              | - 2112278    |

*\* Mit einem größeren Durchmesser als herkömmliche Infusionsbestecke; dadurch erhöht sich der Spülfluss um bis zu 30%. Nur in Europa erhältlich.*

## Hersteller

Spiegelberg GmbH & Co. KG  
Tempowerkring 4  
21079 Hamburg  
Germany

Telefon: 040-790-178-0  
Telefax: 040-790-178-10

E-Mail: [info@spiegelberg.de](mailto:info@spiegelberg.de)  
Internet: [www.spiegelberg.de](http://www.spiegelberg.de)

